

Fiche d'instruction Désinfection des prismes de dédoublement

Français








Extrait du mode d'emploi HAAG-STREIT 'Nettoyage et désinfection'. Mode d'emploi complet: www.haag-streit.com



INTERDICTION ! N'utilisez jamais de prismes de dédoublement endommagés. NOTE: Si vous utilisez «Tristel Pre-Clean Wipes», «Tristel DUO» et «Tristel Rinse Wipes» reportez-vous au mode d'emploi du fabricant.

Nettoyage

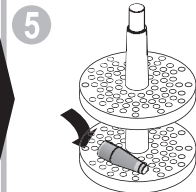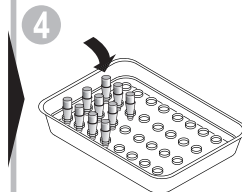
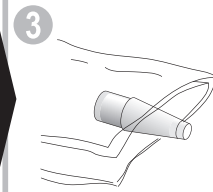
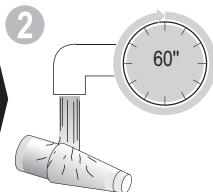
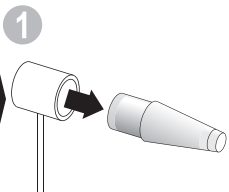


- Le port de gants à usage unique est recommandé (protection personnelle).
1. Retirez les prismes de dédoublement du support.
 2. Nettoyez-les à l'eau courante pendant 60 secondes. Si nécessaire, utilisez un produit nettoyant à pH neutre.

- Rincez le produit nettoyant à l'eau courante ! (60 secondes)
- Si des impuretés sont encore visibles, répétez la procédure de nettoyage.
3. Séchez les prismes à l'aide d'un tissu à usage unique non pelucheux.
 - Vérifiez visuellement la propreté et l'intégrité.

4. Placez les prismes de dédoublement nettoyés dans le récipient en plastique Desinset.
5. Retirez les prismes de dédoublement du récipient en plastique et placez-les sur l'étagère inférieure d'un compartiment en plastique Desinset.
- Les prismes de dédoublement ne doivent pas se superposer.




Désinfection / Rinçage

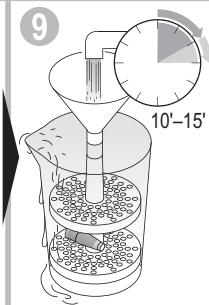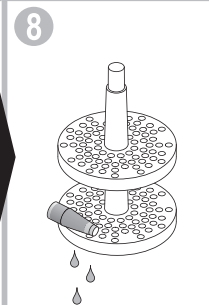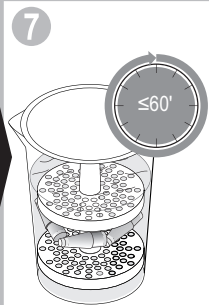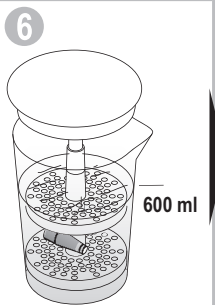

6. Ajoutez au moins 600 ml de solution désinfectante.
- Les prismes de dédoublement doivent être entièrement immergés dans la solution désinfectante !
7. Temps d'application maximal adapté au matériau : 60 minutes.

8. Laissez s'égoutter le compartiment en plastique et placez-le dans l'autre verre gradué.
9. Placez l'entonnoir dans le compartiment en plastique.
- Rincez le contenu à l'eau courante pendant au moins 10 minutes et au maximum 15 minutes.

Séchage / Conservation

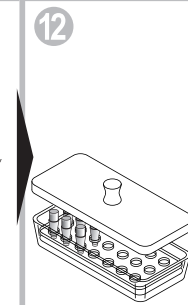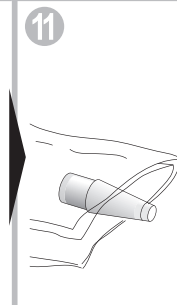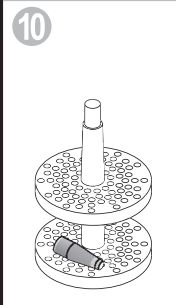

10. Retirez le compartiment en plastique contenant les prismes de dédoublement.
11. Séchez les prismes de dédoublement, un par un, à l'aide d'un tissu à usage unique, doux.
12. Conservez les prismes de dédoublement dans le récipient en verre Desinset fermé.



NOTE !

- Le désinfectant doit être remplacé :
- en cas d'impureté visible
 - une fois par jour ou conformément aux indications du fabricant
 - Liste des désinfectants: www.haag-streit.com
 - HAAG-STREIT recommande Desinset



INTERDICTION !

- Désinfection à l'alcool
- Nettoyage à l'acétone
- Désinfection aux rayons UV
- Stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène
- Température supérieure à 60°C

HAAG-STREIT
DIAGNOSTICS

Haag-Streit AG
Gartenstadtstrasse 10
3098 Koeniz, Switzerland
www.haag-streit.com